

---

## Behelfs-Mund-Nasen-Maske Hinweise zum Gebrauch

(Stand: 23.04.2020)

Aus gegebenem Anlass fertige ich wiederverwendbare Behelfs-Mund-Nasen-Masken, die auch als Behelfs-Mund- und Nasenschutz (BMNS), Stoffgesichtsmaske, Mundschutz oder Alltagsmaske, Behelfsmaske, Community-Maske bezeichnet werden, in kleiner Stückzahl (Einzelfertigung) an.

Dazu sind folgende Hinweise wichtig:

Behelfsmasken dienen während der SARS-CoV-2-Pandemie vor allem dem Fremdschutz. Sie vermindern das Risiko, dass ein evtl. infizierter Benutzer der Behelfsmaske andere Menschen infiziert. Ob sie auch für den Träger der Maske das Risiko vermindern, durch andere infiziert zu werden (Selbstschutz), ist nicht gesichert. Die Behelfsmaske ist in keiner Weise zertifiziert. Daraus ergibt sich:

**Die Benutzung einer Behelfsmaske ersetzt nicht die sorgfältige Beachtung der bekannten Abstands- und Hygienegebote.**

### **Beschreibung:**

Die wiederverwendbare Behelfsmaske ist zweilagig aus 100-prozentigem Baumwollstoff gearbeitet. Dadurch erschwert sie die Atmung vergleichsweise wenig. Zwischen die äußere und die innere Baumwolllage kann bei Bedarf ein beliebiges Vlies (z. B. Kaffeefilter, Staubsaugerfilter oder-beutelmaterial) eingeschoben werden (wird nicht mitgeliefert).

Meine Masken sind innen weiß (Baumwollnesselstoff). Der äußere Baumwollstoff ist wahlweise weiß oder farbig.

Wichtig ist, dass die Maske insbesondere nach oben (Richtung Augen) gut abschließt. Dazu ist in der oberen Kante der Maske ein Tunnel eingearbeitet, in den z.B. ein flexibler Pfeifenreiniger (wird mitgeliefert) eingeschoben wird. Dadurch kann die Kante an die Gesichtskontur angepasst werden. Alternativ kann auch z.B. ein geeigneter Draht oder der Metallstreifen aus einem Heftstreifen zur Formstabilisierung verwendet werden.

In Position gehalten wird die Maske durch zwei Gummizüge oder durch feste Stoffbänder, die hinten zusammengebunden werden.



---

**Handhabung:**

Die Behelfsmaske sollte nach der Benutzung gewaschen werden. Das ist bei 95° („Kochwäsche“) möglich. Die Farbe kann durch das Kochen mit der Zeit etwas ausbleichen. Die Masken können auch in einem kleinen Kochtopf mit etwas Waschmittel ca. 3 Minuten gekocht werden.

**Kurzum**

- Ggf. vor dem ersten Tragen waschen. ✓
- Vor dem Aufsetzen Hände waschen oder desinfizieren. ✓
- Aufsetzen, vertikal auseinanderziehen und obere Kante an Nase und Wangen andrücken. ✓
- Während des Tragens die Behelfsmaske nicht berühren. ✓
- Nach Möglichkeit die Maske nach etwa zwei Stunden austauschen. ✓
- Abnehmen der Maske nur mit Hilfe der Gummibänder/Bindestreifen. ✓
- Nach der Benutzung bei hoher Temperatur waschen, trocknen lassen und ggf. bügeln. ✓
- So ist die Maske für die erneute Verwendung vorbereitet. ✓

**Hofgalerie Dr. Elke M. Geenen**

Shop           www.hofgalerie.net  
E-Mail        geenen@hofgalerie.net  
Tel.           0431 5836708  
24107         Ottendorf, Dorfstr. 10